

FOLHETO INFORMATIVO

NARLISIM® Spray Dispositivo medico, classe IIa

Solução para uso nasal
Frasco 20 ml

INDICAÇÕES:

NARLISIM® Spray é uma solução para uso nasal indicada em caso de obstrução das narinas para facilitar a eliminação do muco; NARLISIM® Spray também pode ser usado como complemento no tratamento das infecções mais comuns do aparelho respiratório.

COMPOSIÇÃO: Pirometaxina® (Ácido Pirrolidon Carboxílico (4%) e Sulfato de cobre pentahidratado), Cloreto de sódio, Hidróxido de sódio, Água purificada.

INSTRUÇÕES DE USO:

Para um uso correto do dispositivo médico NARLISIM® Spray faça o seguinte:

- Retirar a tampa.
- Inclinar ligeiramente a cabeça para trás e inserir a ponta do frasco na narina.
- Pressionar as abas para pulverizar a dose na narina.
- Repetir a mesma operação na outra narina.
- Levantar a cabeça e retirar o eventual excesso de líquido.
- Evitar assoar o nariz após administração do produto, a fim de prolongar o efeito.
- Fechar o frasco e guardar em lugar seco, longe de fontes de calor e de luz.

POSOLOGIA:

CRIANÇAS COM MAIS DE 3 ANOS:

1 nebulização em cada narina, 2 - 3 vezes ao dia

ADULTOS:

1 - 2 nebulizações em cada narina, 3 - 4 vezes ao dia

ADVERTÊNCIAS:

- NARLISIM® Spray é apenas para uso nasal. Não ingerir.
- Utilizar um spray para cada pessoa.
- Não utilizar durante a gravidez.
- Em crianças com idade inferior aos três anos, NARLISIM® Spray deve ser utilizado sob orientação médica.
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade ou incompatibilidade com qualquer componente de NARLISIM® Spray. Uma sensação de ardor ligeiro e temporário, pode ser sentida na aplicação e está associada às características da solução necessárias para assegurar a sua eficácia.
- Usar somente na mucosa intacta.
- Em crianças com idade inferior aos seis anos, aconselha-se que a administração seja feita por um adulto.
- O uso prolongado de NARLISIM® Spray, como acontece com todos os produtos de uso tópico, pode dar origem a irritação local e sensibilização. Caso isso aconteça, interrompa o tratamento e consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Não utilizar NARLISIM® Spray se, ao abrir a caixa pela primeira vez, lhe parecer estar danificada ou não intacta.
- Não usar NARLISIM® Spray após a data de validade indicada na embalagem.
- Manter NARLISIM® Spray fora da vista e do alcance das crianças.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em lugar seco, longe de fontes de calor (temperatura recomendada entre 10 e 30 °C) e de luz. A data de validade refere-se a NARLISIM® Spray fechado, devidamente armazenado. A data de validade está indicada na embalagem.

EFEITOS SECUNDÁRIOS:

Não existem efeitos secundários conhecidos ou esperados relacionados com a utilização de NARLISIM® Spray. Os testes realizados até ao momento não forneceram qualquer evidência de sensibilização ou outros efeitos colaterais.

Em caso de aparecimento de efeitos secundários indesejados, reporte de imediato ao fabricante ou às autoridades de saúde. É necessário assinalar ao Fabricante e às Autoridades competentes, qualquer tipo de acidente grave relacionado com o dispositivo médico.

EMBALAGEM:









Frasco de 20 ml.

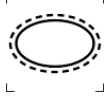



LABORATORI BALDACCI S.p.A. - Via S. Michele degli Scalzi, 73 – 56124
PISA



Data da última revisão: Fevereiro 2023

Legenda dos simbolos	
	Número de lote
	Usar antes de (AAAA-MM)
	Fabricante
	Não dispersar no meio ambiente depois do uso
	Consultar as instruções de utilização
	Estéril com recurso a radiação
	Não utilizar em caso de embalagem danificada e consultar as instruções de utilização
	Dispositivo Medico

	Sistema de barreira estéril único, com embalagem protetora externa
	Data de fabrico